



GK's Hufschuh

info@der-hufschuh.at

www.der-hufschuh.at



Der Hufschuh für alle Fälle

Der GK's Hufschuh - Bedienungsanleitung

Der GK's Hufschuh ist ein Kranken- und Therapiehufschuh mit sehr guter Passform. Er besteht aus einem speziellen Neopren, einer rutschfesten Hartgummisohle, einer Einlegesohle aus Naturkautschuk und ist ideal geeignet zum Sauberhalten von Verbänden oder zum Schutz des Hufes bei vielen Hufproblemen.

Durch die verwendeten Materialien ist er sehr leicht, scheuert nicht und kann dadurch ohne Probleme längere Zeit am Huf getragen werden. Durch das geringe Gewicht wird der GK's Hufschuh von den Pferden innerhalb kürzester Zeit problemlos angenommen. Der Hufschuh ist sehr einfach an- und auszuziehen und wird durch zwei Klettverschlüsse an der Rückseite verschlossen.

Einsatzbereiche

- ◆ als Kranken- und Therapiehufschuh zur Heilung und Linderung von Hufkrankheiten
 - ◆ als Transportschutz
- ◆ als Reitschuh „light“ im Notfall bei Verlust eines Hufeisens (nur im Schritt!)
 - ◆ zum Wässern der Hufe sowie für Angüsse
 - ◆ zum Kühlen der Hufe mit Eis (z.B. bei beginnender Hufrehe)
 - ◆ zur Vergesellschaftung von Pferden (um Huftritte abzumildern)

Was ist zu beachten?

✓ Verwenden Sie immer die empfohlenen Einlagen, da die Lebensdauer der Hufschuhe dadurch verlängert wird!

✗ Die Hufschuhe sollten (besonders zu Beginn) nur unter Aufsicht vom Pferd getragen werden. Dabei sollte die maximale Tragedauer von durchgehend 48 Stunden nicht überschritten werden! Das Auslüften von Huf und Hufschuh ist danach äußerst wichtig!!



Die Hufschuhe können bei 30° Celsius gewaschen werden, sollten aber immer gut trocken sein, bevor sie wieder verwendet werden. Ausnahmefall ist beim Wässern der Hufe.

✓ Zum Schutz der Hufschuhe empfiehlt es sich, zusätzlich Hufglocken über die Hufschuhe zu ziehen. Dadurch sind sie vor Bissen, Hängenbleiben und reintreten besser geschützt



Kontrollierter Weidegang ist mit den Hufschuhen möglich. Bei tiefem (nassem) Boden, starken Wendemanövern und schnellem Galopp ist die Haltbarkeit der Hufschuhe jedoch begrenzt!



Der GK's Hufschuh ist nicht geeignet zur Verwendung auf Paddocks mit Gummimatten oder ähnlichen Materialien. Durch die Hartgummisohle des Hufschuhs geht dieser leicht kaputt und die Gelenke des Pferdes werden dadurch übermäßig belastet!



Um die Hufschuhe besser zu schützen, wird empfohlen über den Hufschuhen Hufglocken zu verwenden. Perfekt geeignet sind dafür unsere GK's Hufglocken mit einem extra langen Schnitt, welche perfekt über die Hufschuhe passen..



Der GK's Hufschuh wurde so entwickelt, dass er vom Pferd längere Zeit (maximal durchgehend 48 Stunden) ohne Schaden getragen werden kann, nicht scheuert und keine Druckstellen verursacht. Dafür werden bei der Herstellung keine harten Materialien verwendet. Genau aus diesem Grund ist der GK's Hufschuh auch nicht unkaputtbar! Pferde haben unendlich Kraft und sind Fluchttiere. Dies bedeutet, dass die Hufschuhe durch reintreten, reinbeißen, Hängenbleiben oder durch heftige Wendemanöver jederzeit kaputt gehen können. Darauf haben wir leider keinen Einfluss und können daher für zerstörte Hufschuhe keine Haftung übernehmen! Wir versuchen aber, unsere Hufschuhe ständig zu verbessern und freuen uns an den vielen Pferden, denen damit bereits geholfen werden konnte!

Wie ziehe ich den Hufschuh an?



Das Logo des Hufschuhs sollte sich immer an der Außenseite befinden, da der Klettverschluss in diesem Fall am Einfachsten nach außen hin verschlossen werden kann.

Im Notfall kann der GK's Hufschuh aber für jeden Huf, egal ob vorne, hinten, rechts oder links, verwendet werden!



Öffnen Sie die beiden Klettverschlüsse und stülpen Sie den oberen Rand des Hufschuhs einfach um.



Heben Sie den Huf Ihres Pferdes hoch und ziehen Sie den Hufschuh von hinten über den Huf.



Stellen Sie den Fuß Ihres Pferdes auf dem Boden ab, klappen Sie den Rand des Hufschuhs wieder hoch und prüfen Sie nach, ob der Huf ordentlich und gerade im Hufschuh steht.



Verschließen Sie beide Klettverschlüsse auf der Rückseite. Ein eventuell zu langes Klettband kann mit einer Schere gekürzt werden.

Der untere, breite Klettverschluss sollte relativ eng anliegend verschlossen werden. Der obere, schmalere Klettverschluss darf ruhig etwas lockerer um das Fesselbein verschlossen werden.



Zum Schutz der Hufschuhe wird empfohlen, Hufglocken über die Hufschuhe zu ziehen.

Dadurch sind sie besser vor Bissen, Tritten und Reintreten geschützt!